

## TORDEN SURGI

### Detergente enzimatico per strumenti chirurgici

<b>Composizione:</b>	Enzimi Proteolitici concentrati g 0.5 Tensioattivi non ionici g 25 Alcool etilico g 5 Acqua q.b. a g 100
<b>Aspetto:</b> <b>Profumo:</b> <b>pH:</b>	Liquido lievemente rosato Caratteristico 9,2
<b>Biodegradabilità:</b>	Oltre il 90%
<b>Confezione:</b>	- Flacone da lt 1 in cartoni da 12 flaconi
<b>Proprietà e Vantaggi:</b>	<p><b>Attività e tempo d'azione</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Detersione di strumenti chirurgici ed odontoiatrici, materiali in vetro, plastica, metallo. Agisce in 10 minuti in acqua tiepida.</li> </ul> <p><b>Tollerabilità:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ E' ben tollerato dalla cute.</li> </ul> <p><b>Controindicazioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ipersensibilità individuale accertata verso il prodotto.</li> </ul>
<b>Indicazioni d'uso</b>	<p>Agitare prima dell'uso; Diluire al 2% (pari a 20 ml per litro con apposito dosatore) in acqua tiepida (25°C); Lasciare gli strumenti in immersione per 10 minuti; Risciacquare.</p> <p><b>Modalità di conservazione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Validità 24 mesi dalla data di confezionamento. Nella sua confezione originale non si altera nel tempo. Conservare in luogo asciutto, a temperatura ambiente e lontano da fonti di calore.</li> </ul>
<b>Applicazioni:</b>	La soluzione di <b>TORDEN SURGI</b> può essere usata anche in apparecchi ad ultrasuoni;

### Informazioni riservate a personale qualificato